

Choix du circuit patient



Raccorder le circuit patient sur la sortie inspiratoire de l'EOVE-70


Mode INEX : circuit simple branche sans fuite



Mode PRM : circuit simple branche à fuites intentionnelles



Montage du circuit patient

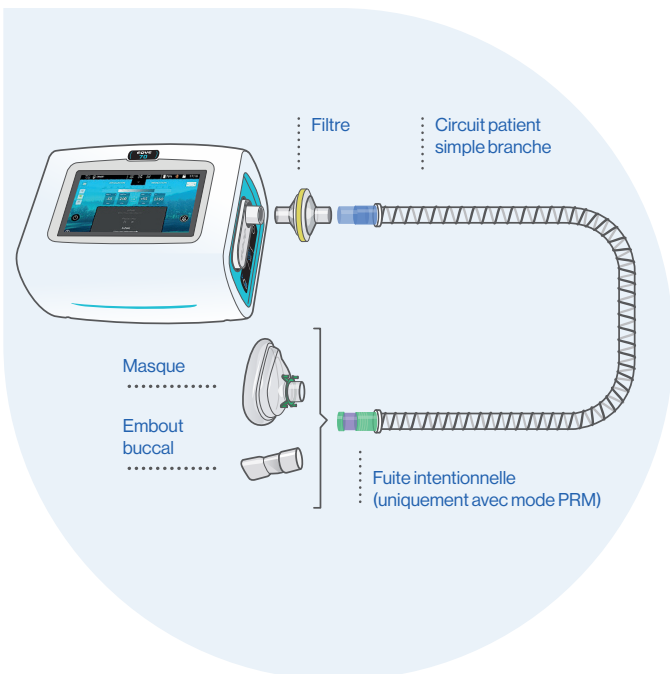

Contact

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS
Parc de haute technologie
6, rue George Besse
92182 Antony Cedex

Service client :

0 820 146 359

0,12 €TTC/min depuis un poste fixe



<https://www.device.airliquidehealthcare.com/fr>



Air Liquide Healthcare est un leader mondial des gaz médicaux, de la santé à domicile, des produits d'hygiène et des ingrédients de spécialité santé. Il a pour mission de fournir à ses clients, tout au long du parcours de soins de l'hôpital au domicile, des produits médicaux, des ingrédients de spécialité et des services qui contribuent à protéger les vies vulnérables.



Guide rapide d'utilisation



Ce guide ne remplace pas le manuel utilisateur

Destiné à toute personne habilitée aux réglages

Allumer l'appareil

Appuyer sur



Éteindre l'appareil




Appui long sur



puis Valider

Gérer le traitement

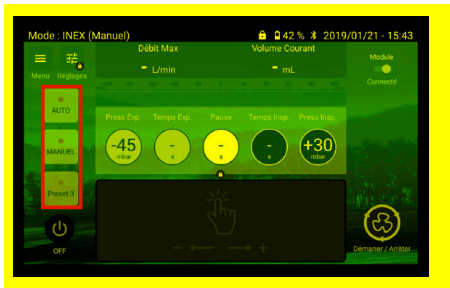

Sélectionner le mode de traitement

Démarrer la séance : appui court sur
Arrêter la séance : appui court sur



Mode INEX Manuel : glisser/déplacer le doigt sur le pavé tactile (de droite à gauche)

Déverrouiller le mode clinique




Appuyer sur le bouton **Menu**, puis **déverrouiller Mode Clinique** puis **Valider**

Réglages du traitement

Depuis le **Mode Réglages**, choisir le **mode de traitement**




Procéder aux réglages du mode (sélection, réglages, validation)

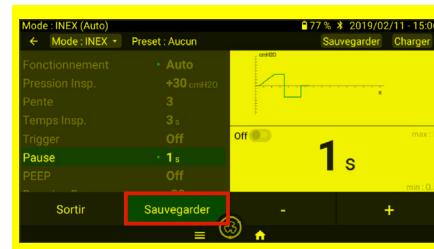

Appuyer sur **"Sauvegarder"** pour mémoriser les réglages

Sauvegarder un programme personnalisé

Reprendre l'étape **"Réglages du traitement"**, puis **"Sauvegarder"**

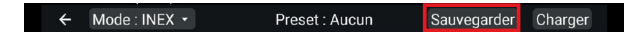

Choisir l'emplacement du programme, **personnaliser** le nom, puis **Valider**



Modification du programme en cours

Cliquer sur le paramètre à modifier, ajuster puis **Valider**



Calibration du circuit patient

Exécuter la **calibration** depuis le menu Clinique en suivant les instructions. Puis **Valider** et revenir sur l'écran d'accueil

