

Distribution d'oxygène médical mobile

Solutions de bouteilles innovantes



Bouteilles aux caractéristiques améliorées et à la fiabilité éprouvée

- Augmenter la sécurité des patients
- Optimiser le temps
- Améliorer l'efficacité

Toujours là pour simplifier la gestion des gaz

INTELLI-OX^{MD} est une solution de gaz médicaux innovante qui combine le manomètre numérique brevetée d'Air Liquide avec une bouteille en aluminium légère, une vanne et un détendeur intégrés, et une poignée ergonomique pour constituer l'un des systèmes de distribution d'oxygène médical USP les plus sûrs et les plus fiables de l'industrie.

INTELLI-OX indique également aux soignants le temps restant précis pour l'oxygène médical dans la bouteille sans avoir à interpréter les données de pression – simplifiant la gestion des gaz et réduisant le gaspillage de gaz – afin que les soignants puissent se concentrer sur les soins aux patients.

Les soignants ont l'assurance qu'INTELLI-OX^{MD} est certifié compatible avec l'IRM (*MR Conditional*) jusqu'à 3,0 Tesla, lorsqu'il est situé à l'extérieur du tunnel de l'IRM.

Des alertes sonores informent les soignants lorsque la bouteille est presque vide pour aider à prévenir les pannes*.

Des informations complètes sur la bouteille d'oxygène médical aident les soignants à assurer la conformité pour le stockage des bouteilles et les soins aux patients.

Une bouteille mobile innovante avec des fonctionnalités améliorées et une fiabilité éprouvée.

Utilise des informations précises pour améliorer les soins aux patients.



Augmenter la sécurité des patients

- L'affichage clair du temps restant et du volume disponible indique précisément quand la bouteille doit être remplacée.
- Des alertes visuelles et sonores sont déclenchées lorsqu'il reste $\frac{1}{4}$ du contenu et 15 minutes au débit. Lorsqu'il reste $\frac{1}{4}$ du contenu au débit actuel, une alerte sonore de 3 bips est déclenchée. Le temps restant sera toujours affiché. Lorsqu'il reste moins de 15 minutes au débit actuel, une alerte sonore de 2 bips est déclenchée et 4 tirets (---) sont affichés. Le graphique à barres de pression, le sablier et les tirets clignotent continuellement.*
- Le calcul automatique du temps restant permet aux soignants de se concentrer sur leur objectif principal: assurer la sécurité des patients.

Optimiser le temps

INTELLI-OX^{MD} permet une installation rapide et facile de l'oxygène médical pour les patients.

- L'ensemble vanne et détendeur intégré signifie qu'on ne perd plus de temps à raccorder un détendeur.
- Les soignants peuvent rapidement sélectionner une bouteille qui répond à leurs besoins du premier coup.

Améliorer l'efficacité

INTELLI-OX fournit aux soignants des informations claires pour mieux gérer l'oxygène médical.

- Les soignants peuvent utiliser en toute sécurité l'entièreté de l'oxygène médical de chaque bouteille.
- Avec une utilisation appropriée, les établissements peuvent réduire la fréquence de rotation des bouteilles et les coûts associés, y compris le temps consacré, à la manutention, au transport et à la gestion des commandes des bouteilles.



*Veuillez noter que le bruit ambiant et de fond peut affecter l'audibilité de l'alerte. Les déficiences auditives peuvent également affecter la capacité d'une personne à détecter l'alerte. L'affichage visuel sur le manomètre numérique (plutôt que l'alerte sonore qui est réglée à des intervalles particuliers) constitue la méthode principale et en temps réel pour déterminer la quantité d'oxygène médical restante en affichant : (1) le graphique à barres de pression (2) le volume de gaz en litres et (3) le calcul du temps restant lorsque la bouteille est en cours d'utilisation.

Air Liquide Santé

Changer la santé. Avec vous.

Contact

www.airliquidehealthcare.ca/fr

Service à la clientèle: 1-833-935-3252

Ontario: medgas.on@airliquide.com

Québec: medgas.qc@airliquide.com

Atlantique: medgas.atl@airliquide.com

Ouest du Canada: medgas.west@airliquide.com

MCM-459-CA-FR | ©2025 Air Liquide Canada Inc.

